




Google Play Store



App Store

Installer et utiliser [l'application française Höra](#)

- L'application Höra repose sur une technologie validée de mesure des chiffres dans le bruit. Elle permet au grand public d'accéder à un test de dépistage auditif afin de vérifier son état auditif et de le surveiller au fil du temps. Facile à utiliser, l'application affiche clairement les résultats des utilisateurs et conserve un historique personnalisé de leur état auditif au fil du temps.
- Vous pouvez installer et utiliser gratuitement [l'application française Höra](#) de la Fondation Pour l'Audition sur les smartphones iOS ou Android via ce [lien](#) ou via ce QR code. Pour les autres langues, vous pouvez télécharger gratuitement l'application [hear-WHO](#). Après installation, vous pouvez choisir entre le néerlandais, l'anglais, l'espagnol, le russe et le chinois. Votre patient peut effectuer le test lui-même à l'aide d'un smartphone et d'oreillettes ou d'un casque. Le test permet d'abord de vérifier s'il fait suffisamment silencieux. Ensuite, le patient peut régler le volume sonore de manière à ce que les chiffres soient bien audibles, et le test débute après une brève introduction. 23 séries de trois chiffres sont prononcées dans du bruit, le patient tape ce qu'il entend sur un clavier, et confirme par "OK".

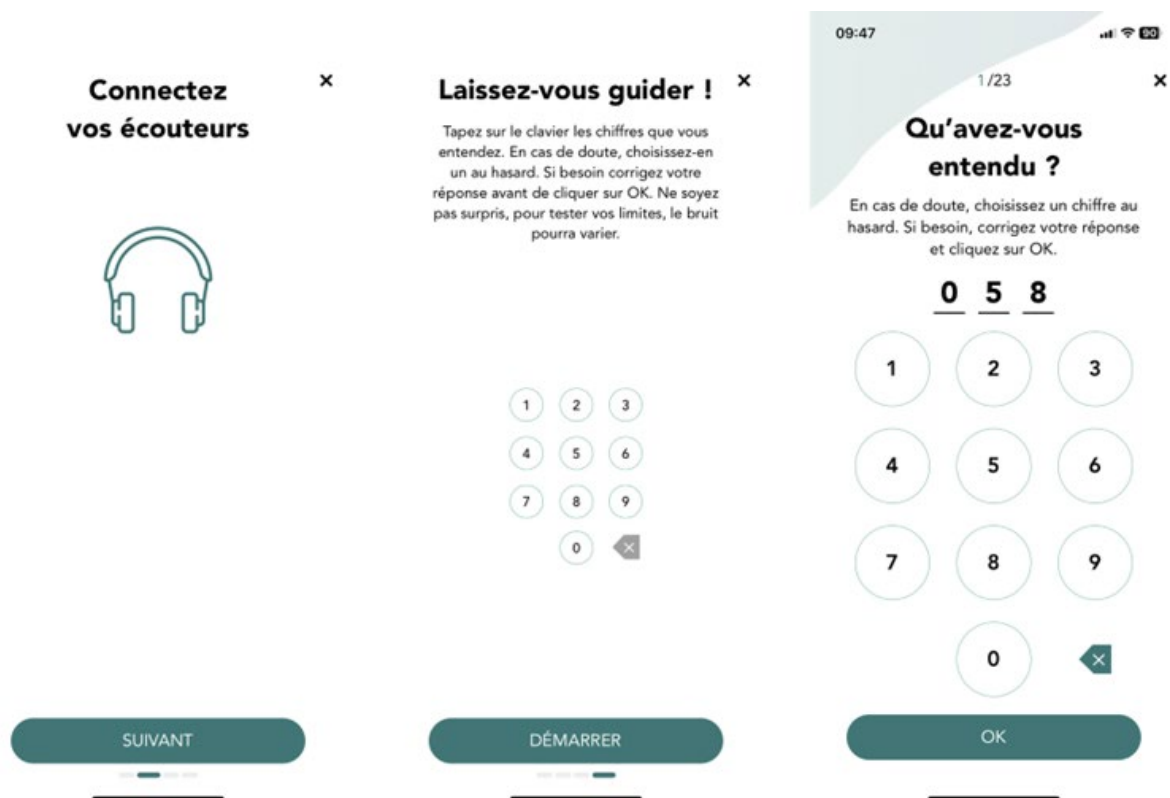

L'interprétation de l'autotest vocal dans le bruit « Höra »

- Ce test donnera un score (entre 0 et 100) qui peut vous aider à décider si vous devez déjà ou pas encore orienter votre patient vers des examens plus approfondis.
- Si le score est inférieur à 50 : il est probable qu'il y a un certain degré de perte auditive. Plus le score est bas, plus la perte auditive est importante. Il faut faire tester l'audition par un médecin ORL ou un audiollogue dans un centre auditif.
- Si le score se situe entre 50 et 70 : l'audition doit être testée régulièrement pour voir si le score continue de baisser. Cela peut se faire avec ce test, par un médecin ORL ou par un audiollogue dans un centre auditif.
- Si le score est supérieur à 70 : dans ce cas, l'audition est probablement bonne et il n'est pas nécessaire d'orienter le patient plus loin.